



طرز ارسال نمونه خون برای مطالعه کروموزومی

- ۴ تا ۵ سی‌سی خون در لوله سدیم هپارین (درب سبز) با تاریخ معتبر.
- پیش از ارسال، کیفیت نمونه از بابت وجود لخته یا لیز بودن بررسی گردد.
- نمونه پیش از ۴۸ ساعت پس از نمونه‌گیری به آزمایشگاه ارسال گردد.

طرز ارسال نمونه خون برای تست‌های مولکولی

- ۴ تا ۵ سی‌سی خون در لوله EDTA (درب بنفش) با تاریخ معتبر.
- پیش از ارسال، کیفیت نمونه از بابت وجود لخته یا لیز بودن بررسی گردد.

طرز ارسال نمونه آمیون

- حداقل دو سرنگ ۱۰ سی‌سی مایع آمیون تهیه شود.
- بهترین زمان نمونه‌گیری بین هفته‌های ۱۴ تا ۱۶ بارداری است.
- نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و هفته بارداری روی سرنگ یا فالکون نوشته شود.
- سرنگ یا فالکون داخل فلاسک قرار داده شود، بدون تماس مستقیم با یخ.
- مدارک مرتبط (غربالگری و سونوگرافی) همراه نمونه ارسال شود.

طرز ارسال نمونه مغز استخوان

- نمونه حتما در محیط ترانسفر استاندارد ارسال شود.
- لوله داخل فلاسک قرار داده شود، بدون تماس مستقیم با یخ.
- گزارش CBC و همچنین تشخیص اولیه پزشک حتما ارسال گردد.
- نمونه در کمتر از ۲۴ ساعت ارسال گردد.

طرز ارسال پرز جفتی (CVS)

- حدود ۱۵ میلی‌گرم نمونه از هفته ۱۲ بارداری تهیه شود.
- نمونه داخل فالکون حاوی محیط کشت (Ham's F10 یا RPMI) قرار داده شود تا از چسبندگی جلوگیری شود.
- درب لوله با پارافیلیم بسته شود.
- ارسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون تماس مستقیم با یخ.

طرز ارسال بلوک‌های پارافینه (CISH/FISH یا مولکولی)

- ارسال در دمای محیط، بدون یخ‌زدگی یا حرارت زیاد.
- بلوک‌ها و لام‌ها داخل جعبه مقوایی مقاوم قرار داده شوند.
- گزارش پاتولوژی و در صورت وجود، گزارش IHC ارسال شود.
- در صورت وجود بیوپسی و جراحی، بلوک مربوط به تومور کامل ارسال گردد.

طرز نمونه‌گیری و ارسال نمونه اسپرم

- حداقل ۴ تا ۵ روز از آخرین نزدیکی گذشته باشد.
- نمونه‌گیری بدون استفاده از کاندوم یا مواد شوینده.
- ظرف نمونه حتماً در دمای ۲۰- فریز و در کمتر از ۲۴ ساعت ارسال شود.



موارد مشترک و ضروری برای همه نمونه‌ها

- نمونه‌های بدون اطلاعات شناسایی (نام و نام خانوادگی) پذیرش نمی‌شوند.
- اطلاعات هر تست باید کامل، دقیق و خوانا نوشته شود.
- مدارک تکمیلی در صورت نیاز، ضمیمه گردد.
- فرم‌ها و برگه‌های مربوطه به امضای بیمار و مهر آزمایشگاه مبدأ برسد.
- فرم‌ها داخل زیپ‌کیپ مجزا قرار داده شوند تا در تماس مستقیم با نمونه نباشند.
- بسته‌های یخ داخل یونولیت قرار داده شود و از تماس مستقیم با نمونه جلوگیری گردد.
- در صورت ارسال نمونه پیش از روز تعطیل، حتماً هماهنگی قبلی با مرکز انجام شود.